

noch im OP im Liegen angelegt. Hierzu muss der Klettverschluss am Beinteil komplett geöffnet werden. Dieser Klettverschluss erlaubt die schnelle Inspektion des operierten Bereichs. Positionieren Sie die Pelotte mittig auf dem Narbenbereich. Schließen Sie dann das Beinteil mit dem Klettverschluss.

Pflege

Die Kompressionsbekleidung sollte regelmäßig gewaschen werden. Nicht nur Salbenreste und Fett sammeln sich im Gewebe, sondern auch Hautschuppen, Schweiß und Staub. Regelmäßiges Waschen schützt Sie vor Infektionen und Ihr Kleidungsstück vor Verschleiß. Waschen Sie die Kompressionsbekleidung immer auf links gezogen. Für die Pflege empfehlen wir ein Feinwaschmittel für die Hand- oder Maschinenwäsche (Schongang bei 40°C) ohne optischen Aufheller und Weichspüler. Mit einem Wäschenetz wird die Kompressionsbekleidung extra geschützt. Um die Trockenzeit zu verkürzen, können Sie die Kompressionsbekleidung in ein Frotteehandtuch legen, fest einrollen und ausdrücken (nicht auswringen). Lassen Sie die feuchte Kompressionsbekleidung nicht im nassen Handtuch liegen. Trocknen Sie das Kleidungsstück lose aufgehängt an der Luft. Legen Sie es auf keinen Fall in die Sonne oder auf einen Heizkörper.

Vermeiden Sie den Kontakt der Kompressionsbekleidung mit schädigenden Einflüssen wie: starke Sonneneinstrahlung, große Hitze, Salben, Öle und Fette, Fleckenwasser, Benzin und aggressive Waschmittel.

Materialzusammensetzung

34 % Viskose, 32% Polyamid, 23% Polyester, 8% Elasthan, 4% Polyurethan
Hinweis: Das eingenähte Textiletikett ist ein wichtiger Bestandteil der Kompressionsbekleidung. Wenn Sie diese Kennzeichnung bei einem Thuasne Produkt entfernen, entfällt der Anspruch auf Gewährleistung, Reparatur oder Umtausch.

Lagerungshinweis und Gebrauchsdauer

Trocken lagern und vor Sonnenlicht schützen. Bei Serienprodukten gilt eine maximale Lagerfähigkeit von 36 Monaten. Daran schließt sich die Nutzungsdauer der Kompressionsbekleidung von 6 Monaten an. Die Verwendungsdauer ist mit dem Symbol einer Sanduhr auf dem Verpackungsetikett aufgedruckt. Maßanfertigungen sind Produkte zur sofortigen Verwendung.

Die medizinische Wirksamkeit bei Seriengrößen und Maßanfertigungen garantieren wir für eine maximale Tragezeit von sechs Monaten. Dies setzt die sachgemäße Behandlung der Kompressionsmaterialien voraus (zum Beispiel bei der Pflege oder dem An- und Ausziehen).

Entsorgung

Sie können Ihre medizinische Kompressionsbekleidung über den Rest- oder Hausmüll entsorgen. Es gibt keine besonderen Kriterien zur Vernichtung.



Medizinprodukt



Einzelner Patient -
mehrfach anwendbar



Größe



Thuasne Deutschland GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177

Hauptstraße 16 · D-35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980
info@thuasne.de · www.thuasne.de



TH13030BDD1_1.0_2021-05



CICATREX®

Kompressions-Hüftthose Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung

Die CICATREX®-Hüftgürtel wird postoperativ nach prothetischen Ersatz des Hüftgelenkes zur Kompression des operierten Bereiches eingesetzt. Dieses Hilfsmittel reduziert Zugspannungen auf das Narbengebiet und wirkt dem postoperativen Ödem entgegen. Die integrierte Druckpelotte sorgt für ein gleichmäßiges Heilen der Narbe und schützt den operierten Bereich bei etwaigen Stürzen.

Dieses Produkt erfordert die qualifizierte und individuelle Anpassung an den Patienten durch den Arzt oder Fachpersonal.

Indikationen

Postoperative Kompression bei hüftendoprothetischen Ersatz, Narbenprophylaxe

Absolute Kontraindikationen

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) Stadium III/IV; dekompensierte Herzinsuffizienz; septische Phlebitis; Phlegmasia coerulea dolens; akutes Erysipel; akute bakterielle, virale oder allergische Entzündungen; unbehandelte oder fortgeschrittene Hauterkrankungen /Kontaktekzeme; unbehandelte offene Wunden; Schwellungen der Extremität unbekannter Ursache; unbehandelte maligne Tumore.

Absolute Kontraindikationen

Ausgeprägte nässende Dermatosen; malignes Lymphödem; periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) Stadium I/II; periphere Neuropathie bei Diabetes mellitus; Sensibilitätsstörungen der Extremitäten; kompensierte Herzinsuffizienz; Hautinfektionen; Hauterkrankungen (z.B. blasenbildende Dermatosen); Unverträglichkeit auf Druck oder Inhaltsstoffe des Produkts; primär chronische Polyarthrit. Bei offenen Wunden im Versorgungsbereich muss der Wundbereich zunächst mit einer adäquaten Wundauflage bzw. einem Verband abgedeckt werden, bevor die Kompressionsbekleidung angelegt wird.

Beim Nichtbeachten dieser Kontraindikationen kann von Thuasne keine Haftung übernommen werden.

Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt. Sollten negative Veränderungen während der Anwendung auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder medizinischen Fachhandel. Im Falle von Reklamationen im Zusammenhang mit dem Produkt, wie beispielsweise Beschädigungen des Gestricks oder Mangel in der Passform, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren medizinischen Fachhandel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Anweisungen des Arztes, Orthopädietechnikers oder medizinischen Fachpersonals beachten. Bei starken Beschwerden oder unangenehmen Empfindungen den Arzt, Orthopädietechniker oder medizinisches Fachpersonal aufsuchen. Bei Raumtemperatur, vorzugsweise in der Originalverpackung aufbewahren.

Zur Gewährleistung der Wirksamkeit und aus Hygienegründen darf das Produkt nicht an andere Patienten weitergegeben werden. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Bestandteile

- Bauchgurt
- Beinteil
- Pelotte



Anpassung

Die Hüftgürtel kann für das linke oder rechte Bein genutzt werden. Für die Anpassung werden 3 Körpermaße benötigt:

Umfang in cm	Maßbezeichnung	S	M	L	XL
Taillenumfang	T	66 - 82	88 - 95	97 - 111	117 - 132
Oberschenkelumfang Schritthöhe	G	44 - 52	50 - 60	57 - 69	65 - 79
Oberschenkelumfang Mitte Oberschenkel	F	40 - 44	45 - 50	49 - 58	56 - 67



Hüftkompressionshose auf rechts montiert



Hüftkompressionshose auf links montiert

Hinweise zur Verwendung

Das elastische CICATREX® Material und die Klettverschlüsse erlauben eine Anpassung über einen breiten Maßbereich. Bei stark abweichenden Maßen kann das Bauchteil einer anderen Größe verwendet werden. In der Regel wird das Hilfsmittel erstmalig