



THUASNE

CICATREX[®]/CICATREX[®] contour

Gebrauchsanweisung - Narbenkompressionsbekleidung

Zweckbestimmung

Kompressionstextilien sind ein Basisbaustein der Narbentherapie. Ziel ist ein flaches und elastisches Narbengewebe, das die Lebensqualität nicht einschränkt.

Mit kontinuierlich flächigem Druck ersetzt CICATREX®/CICATREX® contour die Rückstellkraft und Oberflächenspannung der Haut. Die Oberflächenspannung bildet die natürliche Grenze für die Narbenbildung, um eine Erhebung über das Hautniveau zu verhindern. Die Durchblutung der Narbe wird reduziert, die Kollagenfasern ordnen sich parallel an. CICATREX® ist eine Kompressionstextilie, die in der Narbentherapie zum Einsatz kommt. CICATREX® contour ist eine Kompressionstextilie, die für den Einsatz nach plastisch-ästhetischen Eingriffen vorgesehen ist.

Die Verbindung aus kontinuierlichem Oberflächendruck der Kompressionsbekleidung mit Silikon beeinflusst die Narbenreifung positiv und das Narbenareal wird optisch und funktionell verbessert. Für diese Kombination kann Silon-TEX® in die CICATREX® Kompressionsbekleidung eingenäht werden. Silon-TEX® ist weiches und anschiemsgames textiles Trägermaterial, auf das eine dünne medizinische Silikonschicht aufgebracht ist. Medizinisches Silikon lässt auf der Narbe ein feuchtes Milieu entstehen. Dadurch trocknet die Narbe nicht aus. Es hält die Narbe weich und hat einen positiven Effekt auf das Narbengewebe. Bitte beachten Sie die speziellen Hinweise zu Versorgungen mit Silon-TEX®.

Die CICATREX® contour Kompressionstextilien enthalten kein Silon-TEX®.

Die Kompressionstherapie ist in der Regel eine Langzeitbehandlung und bedarf entsprechender Produkte, die vom Patienten bei Vorliegen der medizinischen Indikation auf ärztliche Anordnung selbst angewendet werden.

Eigenschaften

CICATREX®/CICATREX® contour Kompressionstextilien verbinden eine effektive medizinische Versorgung mit einem hohen Tragekomfort. Die hohe Dehnungsfähigkeit des Materials ermöglicht das einfache An- und Ausziehen des Materials und eine große Bewegungsfreiheit.

CICATREX®/CICATREX® contour Kompressionstextilien sind hypoallergen, beugen Entzündungen im Gewebe vor, lindern den Juckreiz und bieten der frischen Narbe umfassenden Schutz.

CICATREX® Kompressionstextilien sind Maßversorgungen und können sowohl für die obere Extremität als auch für die untere Extremität gefertigt werden.

CICATREX® contour ist eine Serien-Kompressionstextilie für die untere Extremität. Die CICATREX® contour Serien-Kompressionstextilie ist als Leggings mit hoher Taille, Leggings mit niedriger Taille oder Hose in Slipform mit hoher Taille erhältlich.

Indikationen

Schädigung der Haut und der Heilfunktion der Haut mit hypertropher Narbenbildung oder Keloidbildung.

- Nach Verletzungen / Verbrennungen / Operationen
- Hauttransplantationen
- Zur Verbesserung der Narben- / Wundheilung bis zur Ausheilung der Narbe
- Zur Stabilisierung des Operationsergebnisses
- Versorgung von Lymphödemen in speziellen Fällen

Absolute Kontraindikationen

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) Stadium III/IV; dekompensierte Herzinsuffizienz; septische Phlebitis; Phlegmasia coerulea dolens; akutes Erysipel; akute bakterielle, virale oder allergische Entzündungen; unbehandelte oder fortgeschrittene Hauterkrankungen /Kontaktexzeme; unbehandelte offene Wunden; Schwellungen der Extremität unbekannter Ursache; unbehandelte maligne Tumore.

Verwenden Sie Silon-TEX® nicht bei eingerissener Haut oder offenen Wunden und nicht stabil eingehheilten Transplantaten.

Relative Kontraindikationen

Ausgeprägte nässende Dermatosen; malignes Lymphödem; periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) Stadium I/II; periphere Neuropathie bei Diabetes mellitus; Sensibilitätsstörungen der Extremitäten; kompensierte Herzinsuffizienz; Hautinfektionen; Hauterkrankungen (z.B. blasenbildende Dermatosen); Unverträglichkeit auf Druck oder Inhaltsstoffe des Produkts; primär chronische Polyarthrit. Bei offenen Wunden im Versorgungsbereich muss der Wundbereich zunächst mit einer adäquaten Wundauflage bzw. einem Verband abgedeckt werden, bevor die Kompressionsbekleidung angelegt wird.

Bei Nichtbeachtung dieser Kontraindikationen kann von Thuasne Deutschland GmbH keine Haftung übernommen werden.

Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt. Sollten negative Veränderungen während der Anwendung auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder medizinischen Fachhandel. Im Falle von Reklamationen im Zusammenhang mit dem Produkt, wie beispielsweise Beschädigungen des Gestricks oder Mangel in der Passform, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren medizinischen Fachhandel.

Bitte beachten Sie folgendes, wenn in Ihre Kompressionsbekleidung Silon-TEX® eingenäht ist: Sollten negative Veränderungen wie eine Hautallergie durch eine Sensibilität gegenüber Silikon oder Juckreiz auftreten, so wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder medizinischen Fachhandel. Sollte eine Unverträglichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe dieses Produktes bekannt sein, halten Sie bitte vor Gebrauch Rücksprache mit Ihrem Arzt. Sollte die Hautirritation bzw. Hautallergie bestehen bleiben, setzen Sie Silon-TEX® ab.

Die CICATREX® contour Kompressionstextilien enthalten kein Silon-TEX®.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Anweisungen des Arztes, Orthopädietechnikers oder medizinischen Fachpersonals beachten. Bei starken Beschwerden oder unangenehmen Empfindungen den Arzt, Orthopädietechniker oder medizinisches Fachpersonal aufsuchen. Bei Raumtemperatur, vorzugsweise in der Originalverpackung aufbewahren.

Zur Gewährleistung der Wirksamkeit und aus Hygiene Gründen darf das Produkt nicht an andere Patienten weitergegeben werden. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Hinweise zum Anlegen

Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die korrekte Anwendung. Wir empfehlen eine Kompressionsbekleidung durchgehend 24 Stunden zu tragen.

Raue ungefeilte Fingernägel oder scharfkantige Ringe etc. können das sehr feine Gestrick beschädigen. Verwenden Sie deshalb bitte Gummihandschuhe. Bei Schwierigkeiten mit dem Anlegen empfehlen wir unsere Anziehhilfen.

Unsere Haut benötigt bei erhöhter UV-Belastung durch Sonnenlicht Schutz. Dies gilt ganz besonders für das Narbengewebe. Wir empfehlen daher unter der Kompressionsbekleidung einen geeigneten Sonnenschutz in Form von Cremes o. ä. zu verwenden.

CICATREX® Jacke: Schlüpfen Sie erst in den einen Ärmel, dann in den anderen. Ziehen Sie die Jacke über die Schultern und ziehen Sie die Jacke zurecht. Schließen Sie den Verschluss. Achten Sie auf einen faltenfreien Sitz und streichen Sie eventuelle Falten glatt. Achten Sie bei Brustkörbchen oder anatomischen Anformungen darauf, dass diese bequem und ohne Falten sitzen.

CICATREX® Armstrumpf: Öffnen Sie, falls vorhanden, den Verschluss. Klappen Sie den Armstrumpf am oberen Ende um. Ziehen Sie den Armstrumpf über die Hand und über den Arm. Schließen Sie, falls vorhanden, den Verschluss. Achten Sie auf einen faltenfreien Sitz und streichen Sie eventuelle Falten glatt.

CICATREX® Handschuh: Öffnen Sie, falls vorhanden, den Verschluss. Schlüpfen Sie mit den Fingern in den Handschuh und ziehen Sie ihn dann über den Handrücken. Schließen Sie, falls vorhanden, den Verschluss. Achten Sie auf einen faltenfreien Sitz und streichen Sie eventuelle Falten glatt. Bitte krempeln Sie den Handschuh beim Anziehen nicht auf links, das würde das Anziehen erschweren.

CICATREX® & CICATREX® contour Hose: Öffnen Sie, falls vorhanden, den Verschluss. Steigen Sie nacheinander in die Hosenbeine und ziehen diese jeweils bis zur Wade hoch. Anschließend ziehen Sie die Hose herauschauen und Bewegungsfreiheit haben. Wenn Sie einen Schenkelstrumpf tragen, so sitzt er am besten, wenn er den Oberschenkel bedeckt und unterhalb der Gesäßfalte endet. Beim Schenkelstrumpf achten Sie bitte darauf, dass die Naht durchgehend senkrecht verläuft. Schließen Sie, falls vorhanden, den Verschluss. Achten Sie auf einen faltenfreien Sitz und streichen Sie eventuelle Falten glatt.

CICATREX® Beinstrumpf: Öffnen Sie, falls vorhanden, den Verschluss. Klappen Sie den Strumpf am oberen Ende um. Ziehen Sie den Strumpf mit beiden Händen über die Zehen und weiter bis über die Ferse. Wenn der Strumpf am Fuß faltenfrei sitzt und die Ferse sich ins Fersenstück schmiegt, können Sie den Strumpf am Bein weiter hochziehen. Wenn Ihr Strumpf eine offene Spitze hat, dann sitzt er richtig, wenn Ihre Zehen herauschauen und Bewegungsfreiheit haben. Wenn Sie einen Schenkelstrumpf tragen, so sitzt er am besten, wenn er den Oberschenkel bedeckt und unterhalb der Gesäßfalte endet. Beim Schenkelstrumpf achten Sie bitte darauf, dass die Naht durchgehend senkrecht verläuft. Schließen Sie, falls vorhanden, den Verschluss. Achten Sie auf einen faltenfreien Sitz und streichen Sie eventuelle Falten glatt.

Wenn in Ihre CICATREX® Kompressionsbekleidung Silon-TEX® eingnäht ist, beachten Sie folgendes:

- Die Narbe und die umgebende Haut müssen gründlich gesäubert werden.
- Das Narbengewebe sollte fettfrei und trocken gehalten werden.
- Keine Salben, Cremes, Gels oder Lotionen in Kombination mit Silon-TEX® verwenden.
- Ziehen Sie die Kompressionsbekleidung so an, dass das Silon-TEX® direkt auf dem Narbenbereich platziert ist und glatt liegt.
- Nicht bei Hautirritationen verwenden.
- Bei bekannter Unverträglichkeit gegen den Inhaltsstoff (hochreines Silikon) nicht anwenden.
- Sollten Hautunverträglichkeiten während der Anwendung auftreten, bitte das Produkt nicht mehr anwenden und Rücksprache mit dem Arzt halten.
- Verwenden Sie Silon-TEX® nicht auf offenen Wunden!

Die CICATREX® contour Kompressionstextilien enthalten kein Silon-TEX®.

Pflege

Die Kompressionsbekleidung sollte möglichst täglich gewaschen werden. Nicht nur Salbenreste und Fett sammeln sich im Gewebe, sondern auch Hautschuppen, Schweiß und Staub. Regelmäßiges Waschen schützt Sie vor Infektionen und Ihr Kleidungsstück vor Verschleiß. Damit Sie die Kompressionstherapie während des Waschens und Trocknens nicht unterbrechen müssen, benötigen Sie eine Wechselversorgung.

Waschen Sie die Kompressionsbekleidung immer auf links gezogen. Verwenden Sie ein Feinwaschmittel für die Hand- oder Maschinenwäsche (Schongang bei 40°C) ohne optischen Aufheller und Weichspüler. Mit einem Wäschenetz wird die Kompressionsbekleidung extra geschützt. Um die Trockenzeit zu verkürzen, können Sie die

Kompressionsbekleidung in ein Frotteehandtuch legen, fest einrollen und ausdrücken (nicht auswringen). Lassen Sie die feuchte Kompressionsbekleidung nicht im nassen Handtuch liegen. Trocknen Sie das Kleidungsstück lose aufgehängt an der Luft. Legen Sie es auf keinen Fall in die Sonne oder auf einen Heizkörper. Ist in die Kompressionsversorgung Silon-TEX® eingearbeitet, bitte aus hygienischen Gründen das Kleidungsstück nach dem Waschen besonders gut trocknen und möglichst locker und belüftet aufbewahren. Vermeiden Sie den Kontakt der Kompressionsbekleidung mit schädigenden Einflüssen wie: starke Sonneneinstrahlung, große Hitze, Salben, Öle und Fette, Fleckenwasser, Benzin und aggressive Waschmittel.



Materialzusammensetzung

Hinweis: Das eingnähte Textiletikett ist ein wichtiger Bestandteil der Kompressionsbekleidung. Wenn Sie diese Kennzeichnung bei einem Thuasne Produkt entfernen, entfällt der Anspruch auf Gewährleistung, Reparatur oder Umtausch.

CICATREX® Kompressionstextilien nach Materialqualität:

- Nature (gewebt): 60% Viskose, 21% Polyester, 19% Elasthan
- Nature (gestrickt): 54% Viskose, 27% Polyester, 19% Elasthan
- Rigid : 81% Polyamid, 19% Elasthan
- Silver : 46% Viskose, 27% Polyester, 19% Elasthan, 8% Polyamid silberbeschichtet
- Skin : 59% Polyamid, 41% Elasthan

Silon-TEX®:

- Silikonschicht: 100 % medizinisches Silikon, Trägermaterial: 81 % Polyamid, 19 % Elasthan

CICATREX® contour Kompressionstextilien (Hosen):

- 59% Polyamid, 41% Elasthan

Lagerungshinweis und Gebrauchsdauer

Trocken lagern und vor Sonnenlicht schützen. Bei Serienprodukten gilt eine maximale Lagerfähigkeit von 36 Monaten. Daran schließt sich die Nutzungsdauer der Kompressionsbekleidung von 6 Monaten an. Die Verwendungsdauer ist mit dem Symbol einer Sanduhr auf dem Verpackungsetikett aufgedruckt. Maßanfertigungen sind Produkte zur sofortigen Verwendung.

Die medizinische Wirksamkeit bei Seriengrößen und Maßanfertigungen garantieren wir für eine maximale Tragezeit von sechs Monaten. Dies setzt die sachgemäße Behandlung der Kompressionsmaterialien voraus (zum Beispiel bei der Pflege oder dem An- und Ausziehen). Danach sollte Ihr Arzt – wenn notwendig – eine erneute Versorgung verordnen. Bei signifikanter Änderung relevanter Körpermaße (z. B. aufgrund des Therapieerfolges, Gewichtsveränderung) kann eine neue Abmessung und Versorgung auch schon früher begründet sein.

Entsorgung

Sie können Ihre medizinische Kompressionsbekleidung über den Rest- oder Hausmüll entsorgen. Es gibt keine besonderen Kriterien zur Vernichtung.



Größe



Links oder rechts



Kompressionsklasse

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel

Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177

kundenservice@thuasne.de · www.thuasne.de



Hauptstraße 16 · D-35099 Burgwald

Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax +49 6451 7212-980



T913794BDINT2_1.0-2023-07